
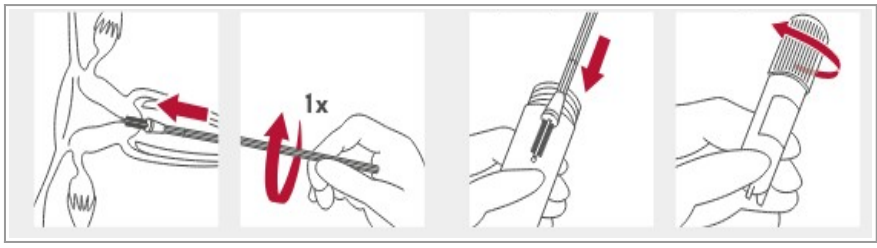


Gebrauchsanleitung Verbrauchsmaterialien für HPV-PCR & Zytologie

Diagnostik	! Jede Probengewinnung muss stets vor einer Ultraschalluntersuchung stattfinden, da das Ultraschallgel die Zellbeurteilung beeinträchtigt und die PCR-Reaktion inhibieren kann.
Nur PAP-Zytologie 	Abstrichbürste <i>Celletta brush</i> und Objektträger Die mittels <i>Celletta brush</i> Abstrichbürste gewonnene Probe wird wie gewohnt auf den zur Verfügung stehenden Objektträger aufgetragen. <i>Cellettabrush</i> ermöglicht Dank des Designs ohne Kugel eine gleichmäßige und gründliche Probenentnahme, ohne das umliegende Gewebe unnötig zu belasten.
Nur HPV-PCR 	Probenröhrchen <i>GynoPrep</i> (Tharmac; flüssiges Transportmedium) + Abstrichbürste <i>Celletta brush</i> Der Abstrich am Gebärmutterhals erfolgt mittels <i>Celletta brush</i> Abstrichbürste entsprechend der folgenden Abbildung. Dabei reicht eine Rotation. Anschließend das Bürstchen im <i>GynoPrep</i>-Medium durch schnelles Rühren, mehrfaches Drehen und an die Wand Drücken spülen.  ! Anschließend die Abstrichbürste entsorgen, das Röhrchen zuschrauben und den Barcode aufkleben.



Dünnschichtzytologie ggf. zzgl. HPV-PCR

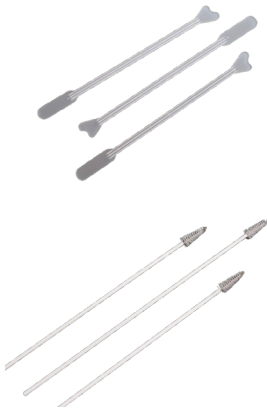

Probengefäß *Alphapath* Flüssigmedium Fixierlösung + Spatel *Cetro Medical* + *Celletta brush* Abstrichbürste

Mittels 2-facher Drehung des **Cetro-Spatels** Zellen vom Gebärmuttermund abschürfen und umgehend in die Fixierlösung des **Alphapath-Gefäßes** überführen.

Dort den Spatel ca. 10x im Medium drehen und an die Wand abstreifen (siehe Abbildung).
Anschließend den Spatel entsorgen.

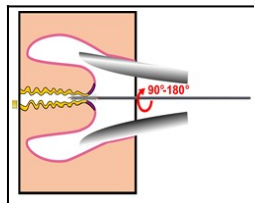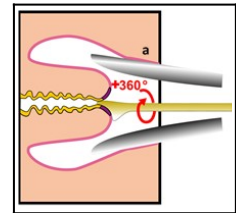

Anschließend zusätzlich eine Probengewinnung aus dem Gebärmutterhals mittels **Celletta brush Abstrichbürste** entsprechend der Abbildung mit **einer** Rotation durchführen.

Die Abstrichbürste dann ebenfalls in die Fixierlösung überführen, ca. 10x im Medium drehen und an der Wand abstreifen.
Anschließend die **Bürste entsorgen**, das **Röhrchen zuschrauben** und den **Barcode aufkleben**.

Aus der **Fixierlösung** kann anschließend die **Dünnschichtzytologie** und bei Wunsch zusätzlich die **HPV-PCR** durchgeführt werden.



Abstrichbürste und Spatel immer entsorgen - **nicht im Gefäß belassen!**
Röhrchen zuschrauben und den **Barcode nicht vergessen!**